



Therapik驱痒止痛器

温度舒适 清扫昆虫叮咬痒痛

扫除痒螨

www.killtheitch.com

网页

长途步行、骑自行车、划船、露营、垂钓等一切户外活动之后，若被昆虫咬伤您将如何应对：

- 在伤口放置冰块
- 擦牙膏
- 擦防痒膏

可是必须一个星期后才痊愈
请问您是否想30秒钟内止痒

Therapik驱痒止痛器是最有效的措施

被咬伤时立即使用，将红色圆端置于被叮咬伤口的外面
启用时，请将蓝色按钮按住不放，直至能够承受的温度为止，一般是20秒钟至40秒钟之内

若您感到炙热难受必须停按蓝色按钮

请您浏览我们的

www.killtheitch.com网页查阅


Therapik驱痒止痛器

Therapik驱痒止痛器是美国与加拿大设计的独权品牌，于2010年在美国市场问世

为获得咨询与特别优惠，请通过www.killtheitch.com

网页及

电话号码 0224 66 48 24 与我们取得联系

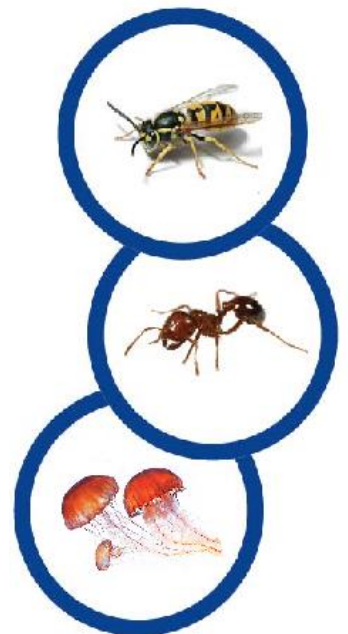

User sheet

美国食品药品监督管理局证实**Therapik**驱痒止痛器获临床证明，若在伤口使用**20**秒钟至**40**秒钟，将具有被多类动物叮咬伤口驱痒止痛功能。**Therapik**驱痒止痛器对各类蚊子、蜂虫、害虫甚至是海蜇与其他昆虫的叮咬具有特殊功效。多类昆虫的毒液会造成痒和痛。对于**Therapik**驱痒止痛器来说，十分简单和具有意义，并已获科学证明。**Therapik**驱痒止痛器使用温和的热量，运用到伤口处加强血液循环来制止痒和痛。

指引：

- 确保被动物、昆虫叮咬伤口干燥，必须擦干才使用。
- 被叮咬时，将红色圆端轻轻置于伤口上面。
- 启用时，按住蓝色按钮直至可以承受的热量为止，一般在**20**秒钟至**40**秒钟之内。当感到炙热时必须立即松开蓝色按钮。

注意：

- 若发现伤口炙热，那是因您在伤口按力太大或置放太久所致。

将**Therapik**驱痒止痛器轻轻置于被叮咬伤口皮外，带给您轻松舒适的治疗方式。

- 如果仍感到痒和痛，可多次使用直至痊愈。欲再次使用至少須隔離**60**秒鐘，讓皮膚恢復原狀。

警報：

若**Therapik**驱痒止痛器的使用方法不正確會導致皮膚轻度灼傷，請仔細閱讀說明書才使用。

慎防：

- Therapik**驱痒止痛器對蛇、蜘蛛和蝎的毒液沒有起到作用。
- Therapik**驱痒止痛器用於被昆蟲叮咬後立即使用。倘若您對某種昆蟲有過敏症（或持續痛），請參考專科醫生諮詢意見。

-Therapik驱痒止痛器不能取代参考專科醫生咨詢意見，或各種医疗
診治措施。若劇痛和一直疼痛則須前往專科醫生。

-Therapik驱痒止痛器不能在眼睛和眼睛範圍和口腔內使用

-因体质或医疗条件而感觉器官衰竭，应谨慎使用Therapik驱痒止痛
器。若不确定，最好参考医生的意见。

-3岁以下儿童不使用此驱痒止痛器

-12岁以下应由家长指引使用驱痒止痛器

保养：

Therapik驱痒止痛器使用9V电池，此驱痒止痛器不附带电池。请每
年替换一次电池或使用多次则提早替换。若电池疲弱则功效会降
低。

保用：

Therapik驱痒止痛器保证减少昆虫叮咬的搔痒痛楚功效。若产品不
能正常使用，可于购买日起14天内替换。请通过

www.killtheitch.com网页与我们取得联系。

独家设计品牌：

The Web 2U.com LLC dba, More Power 2U

4638N Hiatus Road, Ft.Lauderdale, FL 33351, USA-Mã

THPK1000

产地：中国

独家品牌注册许可证#4944297 美国 & #1318827加拿大